

## GIMDOS KAKLELIO MEDŽIAGOS PAĖMIMO Į SKYSTĄ TERPĘ IR SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA

Instrukcija apima gimdos kaklelio medžiagos paėmimą į skystąją terpę žmogaus papilomos viruso tyrimui (ŽPV), skystosios citologijos plonasluoksniams tepinėliui (PAPst), lytiškai plintančių infekcijų (LPI) nustatymui bei imunohistocheminiam CINtec PLUS tyrimui atlikti.

### INFORMACIJA PACIENTEI IR GYDYTOJUI:

1. LAIKAS: 2 savaitės nuo pirmosios paskutinių mėnesinių dienos (10-20 mėnesinių ciklo diena).
2. NENAUDOTI tamponų, intravagininį preparatų, vengti lytinių santykių, neplauti makšties 48 val. prieš tyrimą.
3. NENAUDOTI acto rūgšties ir liugolio tirpalų prieš tepinėlio paėmimą.
4. NUVALYTI medvilnės tamponu gleivių ir paviršinio eksudato perteklių nuo gimdos kaklelio.
5. SUVILGYTI makšties skėtiklį prieš imant medžiagą PAP tik šiltu vandeniu.

### MĖGINIO PAĖMIMAS Į SKYSTĄJĄ TERPĘ NAUDOJANT BD SurePath™ ŠLUOTELĘ



1. BD SurePath™ ilgieji šluotelės šereliai įvedami į endocervikinį kanalą taip, kad šluotelės trumpieji šereliai kontaktuotų su išorine gimdos kaklelio dalimi. Šluotelė sukama 3-5 kartus pagal laikrodžio rodyklę.
2. **Šluotelės galvutė turi būti nuimama nuo kotelio ir įmetama į skystąją terpę „BD SurePath™**. Šluotelę būtina įdėti į didesnę buteliuko dalį. Mažesnioji dalis naudojama laboratorijoje medžiagai išsiurbti specialiu „MultiProcessor“ švirkštu, todėl ji privalo būti tuščia.
3. Ant indelio su terpe ir šluotele užrašyti arba užklijuoti lipduką su pacientės vardu ir pavarde. Lipduko negalima klijuoti ant laboratorijos jau užklijuoto lipduko su barkodu.
4. Skystoji terpė kartu su tinkamai užpildytu siuntimu siunčiama plastikiniame, sandariai užspaudžiamame maišelyje ar transportavimo konteineryje.
5. Mėginys siunčiamas į laboratoriją (indelį su mėginiu galima laikyti kambario temperatūroje iki 4 sav., šaldytuve (+4 °C) – iki 6 mėn.).



#### Dėmesio:

- BD SurePath™ šluotelės negalima naudoti nėščioms pacientėms po 10 nėštumo savaitės!
- Jeigu tyrimas neinformatyvus (netinkamas vertinti), pakartotinis tyrimas atliekamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo gimdos kaklelio medžiagos paėmimo.



**VPC.LT**

Valstybinis patologijos centras

#### SIUNTIMO ATLIKTI PATOLOGIJOS TYRIMĄ (Nr. 014-1-1/a) PILDYMO REIKALAVIMAI

##### Siuntime pažymėti:

1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Klinikinę diagnozę.
3. Siunčiant BD SurePath terpėje nurodyti pageidaujamus testus. Citologija arba PAPst; ŽPV; LPI, CINtec PLUS).
4. Nurodyti PROGRAMA, jei tyrimas atliekamas pagal gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programą.
5. Paskutinių menstruacijų datą ar klimakterinį periodą.
6. Hormoninių preparatų, kontraceptinių priemonių vartojimą.
7. Makroskopinius gimdos kaklelio pokyčius.
8. Anksčiau atliktus patologijos ar molekulinis tyrimus.
9. Taikytą spindulinį ar chemoterapinį gydymą.

#### INFORMACIJA TEIKIAMA:

elektroniniu paštu: [info@vpc.lt](mailto:info@vpc.lt) arba  
Centro telefonais:

Medžiagos priėmimas : 85 2601813  
Informacija: 85 2477350